

Abnahmeanleitung Madenwurm

So kommen Sie dem Madenwurm auf die Schliche ...



Anwendung der Analfilme zur Madenwurmdiagnostik:

1. Bitte diese Untersuchung morgens vor dem ersten Stuhlgang durchführen.
2. Entfernen Sie zuerst den mit schwarzem Querstreifen markierten Schutzfilm, die Folie mit dem orangenen Streifen bleibt auf dem weißen Schutzstreifen kleben.
3. Pressen Sie die so freigewordene Klebefläche mit orangenem Streifen auf die Haut der Analgegend.
4. Nach der Probennahme fixieren Sie den Analfilm mit der Klebefläche nach unten auf dem mitgelieferten Objektträger (weißen Schutzstreifen belassen).
5. Stecken Sie den mit dem Klebestreifen versehenen Objektträger in das Schutzgefäß, verschließen Sie dieses und schicken es mit dem vollständig ausgefüllten Probenbegleitschein (Adresse!) im beigefügten Versandbeutel an unser Labor.
6. **Bitte beachten:** Zur sicheren Diagnostik einer Madenwurminfektion sind bei negativem Befund mindestens zwei Wiederholungsuntersuchungen erforderlich.

